

# Anlege-Hinweise Atemschutzmasken



1. Halten Sie mit Ihren Fingern die Maske an der Außenseite fest.
2. Halten Sie die Maske über Nase und Mund in Position und ziehen Sie den Kopfgurt nach hinten.
3. Befestigen Sie den Kopfgurt, verbessern Sie den Komfort und verhindern Sie Undichtigkeiten.
4. Verwenden Sie beide Hände, drücken Sie den Nasenbügel auf die Nase und verschieben Sie den Kopfgurt so, um eine positive Gesichtsabdichtung zu gewährleisten.
5. **Dichtungsprüfung**
  - a) Um den Sitz der Atemschutzmaske zu testen, halten Sie mit beiden Händen die Maske fest und atmen Sie scharf ein.
  - b) Falls im Nasenbereich ein Luftstrom zu spüren ist, stellen Sie den Nasenbügel neu ein und drücken Sie ihn erneut fest auf die Nase.
  - c) Falls an den Rändern der Atemschutzmaske ein Luftstrom zu spüren ist, stellen Sie die Maske so ein, um eine bessere Passform zu erzielen.
6. Wechseln Sie die Maske sofort, falls das Atmen schwierig wird oder die Atemschutzmaske beschädigt oder verzerrt ist.
7. Wechseln Sie die Atemschutzmaske, falls keine ordnungsgemäße Gesichtsversiegelung sichergestellt werden kann.
8. Die sorgfältige Einhaltung dieser Anweisungen ist ein wichtiger Schritt bei der sicheren Verwendung von Atemschutzmasken.